



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Freka® GastroTube

Guide de soins pour
le Freka® GastroTube



Date du placement de la sonde Freka® GastroTube:

Table des matières


1. Introduction	p.3
2. Les pièces d'une sonde Freka® GastroTube	p.3
3. Soins quotidiens	p.4
4. Points d'attention pour les soins	p.4
5. Contrôle du niveau d'eau dans le ballonnet	p.6
6. La sonde est néanmoins bouchée	p.7
7. Nutrition médicale chez Fresenius Kabi	p.8
8. Notes	p.11

1. Introduction

Cette brochure vous informe sur l'utilisation de la sonde Freka® GastroTube et les soins qui y sont liés. Pour une utilisation optimale de la sonde, de bons soins sont primordiaux. Dans cette brochure vous trouverez une série de conseils qui pourront vous être utiles. Si vous avez besoin de plus d'informations, nous vous invitons à prendre contact avec votre médecin traitant.

La sonde Freka® GastroTube est une sonde à ballonnet placée dans l'estomac. Elle est maintenue dans l'estomac grâce à son ballonnet gonflé à l'eau stérile.

2. Les pièces d'une sonde Freka® GastroTube

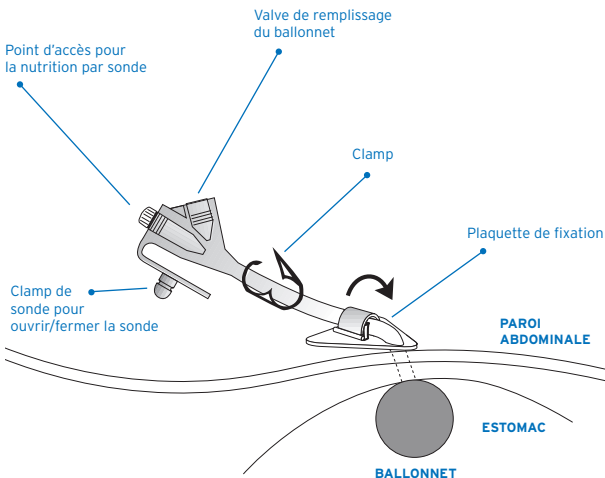

3. Soins quotidiens

- Desserrez et remplacez la plaquette de fixation.
- Nettoyez le site de ponction et la partie inférieure de la plaquette de fixation à l'eau chaude et au savon doux. Ensuite, séchez-les bien!
- La sonde doit être pivotée à 360° dans la stomie chaque jour pour garantir sa liberté de mouvement.
- Au niveau du point d'entrée, vérifiez l'absence de fuites, rougeur, tuméfaction ou irritation. En cas de problèmes, consultez votre médecin.

4. Points d'attention pour les soins

- L'administration de l'eau et/ou de la nutrition par sonde peuvent débuter immédiatement après l'insertion de la sonde.
- Afin d'éviter que votre sonde ne se bouche, il convient de la rincer avant et après l'alimentation et l'administration de médicaments (au moins une fois par jour) avec un minimum de 20 ml d'eau. En cas d'alimentation continue, vous pouvez rincer lors du changement de la poche d'alimentation.



Seringue ENFit de 20 ml

Référence: 9000785

Code CNK: 3393-824

- Si vous devez administrer des médicaments via la sonde, il faut les injecter sous forme liquide et ne pas les injecter en même temps que l'alimentation. Il en va de même pour de l'automédication (par ex contre les maux de tête). Si les médicaments ne sont pas disponibles sous forme liquide, demandez conseil à votre pharmacien par rapport au mode d'administration.
- Utilisez une seringue ENFit pour rincer la sonde et/ou pour l'administration de la médication.
- Ne pas utiliser des liquides acides, notamment du thé ou des jus de fruits, en combinaison avec l'alimentation par sonde. Cela peut causer un caillot d'ingrédients alimentaires.
- En cas de fuites ou en cas de douloureux, avertissez votre médecin.
- La sonde peut rester en place 4 à 6 mois. Le remplacement dépendra de l'état de la sonde et du ballonnet. (3 sondes à ballonnet sont remboursées par an).
- L'administration fréquente de boissons alcoolisées peut endommager le matériau de la sonde et nécessiter son remplacement, même en cas de pose récente.
- Le risque de défauts matériels provoqués par les médicaments peut être pratiquement éliminé si la sonde est correctement rincée avant et après chaque administration de médicaments.

5. Contrôle du niveau d'eau dans le ballonnet

Le volume de remplissage du ballonnet doit être contrôlé chaque jour.

1. Pousser la sonde dans la stomie. Il est impératif de maintenir la sonde en place afin d'éviter qu'elle ne sorte de la stomie.
2. Introduire une seringue dans la valve.
3. Prélever et noter le niveau d'eau.
 - › Si la quantité de remplissage du ballonnet est nettement inférieure à la mesure précédemment ou s'il y a des fuites dans la valve, remplacez la sonde.
 - › Si la quantité de remplissage du ballonnet correspond à la mesure précédemment, le ballonnet peut être rempli à nouveau avec 5 à 7,5 ml d'eau stérile.

ATTENTION!

- Ne remplissez jamais le ballonnet d'air.
- La capacité maximale du ballonnet de 7,5 ml ne doit pas être dépassée.
- Si la sonde est retirée accidentellement, un médecin doit être immédiatement consulté, car la stomie peut se refermer rapidement.

6. La sonde est néanmoins bouchée

Si malgré les précautions prises, la sonde se bouche, suivez les étapes reprises ci-dessous jusqu'à ce que la sonde soit débouchée:

- 1.Injectez de l'air (10 ml) avec une seringue ENFit. Si cela ne fonctionne pas, passez à l'étape 2.
- 2.Rincez la sonde à l'eau tiède sans exercer de force. Si cela ne fonctionne pas, passez à l'étape 3.

Selon avis médical (3 et 4):

- 3.Injectez 30 ml d'une solution à base de bicarbonate 5%. Laissez macérer quelques minutes puis essayez d'injecter de l'air. Répétez le geste éventuellement plusieurs fois. Si cela ne fonctionne pas, passez à l'étape 4.
- 4.Injectez une solution d'acétylcystéine (= dissoudre un comprimé effervescent d'acétylcystéine 600 mg dans de l'eau).

Les produits mentionnés aux étapes 3 et 4 sont disponibles en pharmacie. Si aucune des étapes ci-dessus n'apporte une solution, veuillez consulter votre médecin traitant.

Si la sonde est bouchée, elle ne peut en aucun cas être débouchée avec force, par exemple avec une seringue ENFit de 2,5 - 5 ml, à l'aide d'un mandrin ou d'un objet tranchant.

7. Nutrition médicale chez Fresenius Kabi


Fresenius Kabi propose une gamme complète de suppléments nutritionnels oraux, de nutrition par sonde et du matériel d'administration ainsi que les pompes. Ceux-ci sont disponibles dans votre pharmacie ou chez votre prestataire de soins à domicile.

L'objectif de la denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales est de remédier aux carences nutritionnelles quand il n'est plus possible de couvrir les besoins avec un régime alimentaire normal. Un support nutritionnel approprié et adapté au bon moment peut aider à réduire les complications médicales et à améliorer la récupération et la qualité de vie.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro **03 880 73 00** ou via notre formulaire de contact sur **www.fresenius-kabi.be** ou par mail à l'adresse **info.be@fresenius-kabi.com**.



Nutrition orale

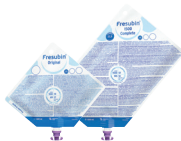

Nutrition par sonde



Seringues et autres accessoires



Pompes

Produits	N° de réf.	Code CNK	Presentation
Alimentation par sonde: gamme standard			
Fresubin® Original 500 ml	7577221	1628-684	500 ml x 15
Fresubin® Original 1000 ml	7577231	1628-700	1000 ml x 8
Fresubin® Original 1500 ml	7577241	2122-323	1500 ml x 5
Fresubin® Original Fibre 500 ml	7527221	1628-650	500 ml x 15
Fresubin® Original Fibre 1000 ml	7527231	1628-668	1000 ml x 8
Fresubin® Energy 500 ml	7381221	1401-512	500 ml x 15
Fresubin® Energy 1000 ml	7381231	1422-567	1000 ml x 8
Fresubin® Energy Fibre 500 ml	7526221	1741-354	500 ml x 15
Fresubin® Energy Fibre 1000 ml	7526231	2162-980	1000 ml x 8
Fresubin® HP Energy 500 ml	7348221	1490-614	500 ml x 15
Fresubin® HP Energy 1000 ml	7348231	2162-998	1000 ml x 8
Fresubin® HP Energy Fibre 500 ml	7987221	3113-727	500 ml x 15
Fresubin® HP Energy Fibre 1000 ml	7987231	3113-735	1000 ml x 8
Fresubin® 2kcal HP 500 ml	7190221	2998-037	500 ml x 15
Fresubin® 2kcal HP Fibre 500 ml	7191221	2998-045	500 ml x 15
Alimentation par sonde: gamme complète			
Fresubin® 1000 Complete 1000 ml	7384231	2679-470	1000 ml x 8
Fresubin® 1200 Complete 1000 ml	7383231	2455-285	1000 ml x 8
Fresubin® 1500 Complete 1500 ml	7580241	2679-496	1500 ml x 5
Fresubin® 1800 Complete 1500 ml	7578241	2679-504	1500 ml x 5
Fresubin® 2250 Complete 1500 ml	7526241	2679-520	1500 ml x 5
Alimentation par sonde: gamme spécifique			
Fresubin® Intensive 500 ml	7134221	3518-404	500 ml x 15
Fresubin® Soya Fibre 1000 ml	7130231	2656-213	1000 ml x 8
Survimed® OPD HN 500 ml	7143221	2896-397	500 ml x 15
Diben® 500 ml	7004221	2210-128	500 ml x 15
Diben® 1,5kcal HP 500 ml	7111221	3238-888	500 ml x 15
Fresubin® Hepa 500 ml	7131221	2489-177	500 ml x 15
Supportan® 500 ml	7025221	2122-356	500 ml x 15

Produits	N° de réf.	Code CNK	Presentation
Alimentation par sonde: gamme pédiatrique			
Frebini® Original 500 ml	7469221	1742-071	500 ml x 15
Frebini® Original Fibre 500 ml	7470221	1741-370	500 ml x 15
Frebini® Energy 500 ml	7467221	2124-469	500 ml x 15
Frebini® Energy Fibre 500 ml	7468221	2124-477	500 ml x 15
Seringues			
Freka® Connect 1 ml, ENFit/ProNeo LDT	9000788LDT	3644-945	30
Freka® Connect 2,5 ml, ENFit/ProNeo LDT	9000782LDT	3644-952	30
Freka® Connect 5 ml, ENFit/ProNeo LDT	9000783LDT	3644-978	30
Freka® Connect 10 ml, ENFit	9000784	3393-816	100
Freka® Connect 20 ml, ENFit	9000785	3393-824	100
Freka® Connect 60 ml, ENFit	9000786	3393-832	50
Freka® Connect 60 ml, ENFit	9000786XS	3762-671	10
Freka® Connect 100 ml, ENFit	9000787	3396-991	30

[illegible]



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 9
2627 Schelle
+32 (0)3 880 73 00
info.be@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.be
www.fresubin.be

2019-05-14/37