



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Freka® GastroTube

Informatie over de verzorging
van de Freka® GastroTube



Datum van de plaatsing van de Freka® GastroTube:


Inhoudstafel

1. Introductie	p.3
2. Onderdelen van de sonde	p.3
3. Dagelijkse verzorging	p.4
4. Algemene adviezen	p.4
5. Controle van het vulvolume van de ballon	p.6
6. De sonde is toch verstopt	p.7
7. Voeding voor medisch gebruik bij Fresenius Kabi	p.8
8. Notities	p.11

1. Introductie

Deze brochure geeft u meer informatie over de verzorging van de Freka® GastroTube. Voor het optimaal functioneren van de ballonsonde is een goede verzorging erg belangrijk. Als leverancier van de Freka® GastroTube geven wij u een aantal nuttige tips. Indien u behoefte heeft aan meer informatie, gelieve dan contact op te nemen met uw arts. De Freka® GastroTube is een sonde die in de maag wordt geplaatst. De sonde wordt op zijn plaats gehouden door een ballon aan de binnenkant van de maag. Deze ballon wordt gevuld met steriel water.

2. Onderdelen van de sonde

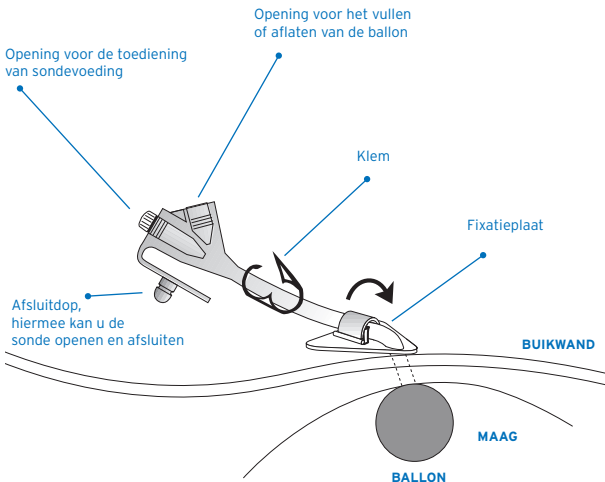


3. Dagelijkse verzorging

- Open de fixatieplaat en trek deze omhoog.
- Reinig het stomagebied en de onderkant van de fixatieplaat zorgvuldig met warm water en milde zeep. Droog beiden vervolgens grondig!
- De sonde moet elke dag 360° in de stoma worden gedraaid om bewegingsvrijheid te kunnen garanderen.
- Controleer het stomagebied op lekken, roodheid, zwelling of irritatie. Bij problemen, gelieve uw arts te verwittigen.

4. Algemene adviezen

- Het toedienen van water en/of sondevoeding kan direct worden gestart, na het plaatsen van de sonde.
- De sonde moet voor en na elke voeding of medicatietoediening (ten minste één keer per dag) worden gespoeld met 20 ml water. Bij continue voeding kan dit bij het verwisselen van elke voedingszak.

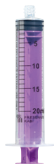

ENFit spuit 20ml
Referentie: 9000785
CNK code: 3393-824

- Eventuele medicatie dient bij voorkeur in opgeloste vorm via de sonde te worden toegediend en mag niet samen met de voeding worden gegeven. Hetzelfde geldt ook voor zelfmedicatie (bijv. tegen hoofdpijn). Als de medicatie niet in vloeibare vorm verkrijgbaar is, vraag dan uw apotheek om toedieningsadvies.
- Gebruik een ENFit spuit voor het spoelen van de sonde en/of het toedienen van medicatie.
- Gebruik geen zuurhoudende vloeistoffen, met name vruchtenthee of vruchtensappen, in combinatie met sondevoeding. Deze kunnen namelijk stolling van voedingsbestanddelen veroorzaken.
- Als er lekkage is of als er sprake is van verharding of pijn, moet dit altijd door een arts worden onderzocht.
- De sonde kan 4 - 6 maanden op zijn plaats blijven. De verandering zal afhangen van de staat van de sonde en het ballonnetje (per jaar worden 3 ballonsondes terugbetaald).
- Frequentie toediening van alcoholische dranken kan leiden tot schade aan de sonde, waardoor deze na slechts korte tijd al zal moeten worden vervangen.
- Materiaaldefecten door geneesmiddelen kunnen grotendeels worden uitgesloten als de sonde voor en na elke toediening van geneesmiddelen wordt gespoeld.

5. Controle van het vulvolume van de ballon

Het vulvolume van de ballon dient dagelijks te worden gecontroleerd.

1. Duw de sonde in de stoma. Het is noodzakelijk om de sonde op zijn plaats te houden om te voorkomen dat deze uit de stoma komt.
2. Breng de spuit in het ventiel.
3. Trek de vulvloeistof op en noteer het vulvolume.
 - › Als blijkt dat de vulling tot onder het vorige gemeten niveau is gedaald of als er lekken in het ventiel zijn ontstaan, moet de Freka[®] GastroTube worden vervangen.
 - › Indien het vulvolume overeenkomt met het vorige gemeten niveau, dan kan de ballon terug gevuld worden met 5 - 7,5 ml steriel water.

OPGELET!

- Vul de ballon nooit met lucht.
- De maximale capaciteit van de ballon van 7,5 ml mag niet worden overschreden.
- Als de sonde per ongeluk is verwijderd, moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd, omdat de stoma zich snel weer kan sluiten.

6. De sonde is toch verstopt

Als de Freka® GastroTube sonde toch verstopt raakt, dan kunt u de onderstaande stappen doorlopen totdat de sonde weer ontstopt is:

1. Doorspuiten met een ENFit spuit met lucht (10 ml). Indien geen succes, ga naar stap 2.

2. Doorspoelen met lauw water.

Hierbij moet u geen kracht uitoefenen. Indien geen succes, ga naar stap 3.

Onder medisch toezicht (3 en 4):

3. Inbrengen van 30ml bicarbonaatoplossing 5%. Een aantal minuten laten weken en vervolgens proberen door te spuiten met lucht. Eventueel een aantal keer herhalen. Indien geen succes, ga naar stap 4.

4. Inbrengen van acetylcysteïne oplossing (= 1 bruistablet acetylcysteïne 600 mg oplossen in water).

De producten van stap 3 en 4 zijn verkrijgbaar bij de apotheek. Als geen van de stappen hierboven een oplossing biedt, dan kunt u uw behandelende arts raadplegen.

Bij een verstopping mag de sonde in geen geval met kracht worden vrijgemaakt, bijvoorbeeld met een ENFit spuit van 2,5 - 5 ml, met behulp van een geleidedraad of een scherp voorwerp.

7. Voeding voor medisch gebruik bij Fresenius Kabi


Fresenius Kabi biedt een volledig gamma aan drinkvoedingen, sondevoedingen en toebehoren. Deze zijn beschikbaar bij uw apotheek of uw thuiszorgfirma.

Het doel van voeding voor medisch gebruik is om voedingstekorten aan te pakken wanneer men niet meer in staat is om de behoeften te dekken via de gewone voeding. De juiste voedingsondersteuning op het juiste moment kan helpen in het verminderen van medische complicaties en het herstel en om de onafhankelijkheid te verbeteren.

Indien u vragen heeft, kan u steeds met ons contact opnemen via telefoon op het nummer **03 880 73 00**, via het contactformulier op onze website www.fresenius-kabi.be of via het mailadres info.be@fresenius-kabi.com.



Orale voedingen

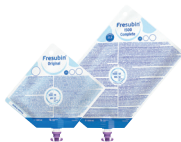

Sondevoeding



Spuiten en toebehoren



Pompen

Producten	Ref. Nr.	CNK-code	Verpakking
Sondevoeding: standaard gamma			
Fresubin® Original 500 ml	7577221	1628-684	500 ml x 15
Fresubin® Original 1000 ml	7577231	1628-700	1000 ml x 8
Fresubin® Original 1500 ml	7577241	2122-323	1500 ml x 5
Fresubin® Original Fibre 500 ml	7527221	1628-650	500 ml x 15
Fresubin® Original Fibre 1000 ml	7527231	1628-668	1000 ml x 8
Fresubin® Energy 500 ml	7381221	1401-512	500 ml x 15
Fresubin® Energy 1000 ml	7381231	1422-567	1000 ml x 8
Fresubin® Energy Fibre 500 ml	7526221	1741-354	500 ml x 15
Fresubin® Energy Fibre 1000 ml	7526231	2162-980	1000 ml x 8
Fresubin® HP Energy 500 ml	7348221	1490-614	500 ml x 15
Fresubin® HP Energy 1000 ml	7348231	2162-998	1000 ml x 8
Fresubin® HP Energy Fibre 500 ml	7987221	3113-727	500 ml x 15
Fresubin® HP Energy Fibre 1000 ml	7987231	3113-735	1000 ml x 8
Fresubin® 2kcal HP 500 ml	7190221	2998-037	500 ml x 15
Fresubin® 2kcal HP Fibre 500 ml	7191221	2998-045	500 ml x 15
Sondevoeding: Complete gamma			
Fresubin® 1000 Complete 1000 ml	7384231	2679-470	1000 ml x 8
Fresubin® 1200 Complete 1000 ml	7383231	2455-285	1000 ml x 8
Fresubin® 1500 Complete 1500 ml	7580241	2679-496	1500 ml x 5
Fresubin® 1800 Complete 1500 ml	7578241	2679-504	1500 ml x 5
Fresubin® 2250 Complete 1500 ml	7526241	2679-520	1500 ml x 5
Sondevoeding: specifiek gamma			
Fresubin® Intensive 500 ml	7134221	3518-404	500 ml x 15
Fresubin® Soya Fibre 1000 ml	7130231	2656-213	1000 ml x 8
Survimed® OPD HN 500 ml	7143221	2896-397	500 ml x 15
Diben® 500 ml	7004221	2210-128	500 ml x 15
Diben® 1,5kcal HP 500 ml	7111221	3238-888	500 ml x 15
Fresubin® Hepa 500 ml	7131221	2489-177	500 ml x 15
Supportan® 500 ml	7025221	2122-356	500 ml x 15

Producten	Ref. Nr.	CNK-code	Verpakking
Sondevoeding: pediatriesch gamma			
Frebini® Original 500 ml	7469221	1742-071	500 ml x 15
Frebini® Original Fibre 500 ml	7470221	1741-370	500 ml x 15
Frebini® Energy 500 ml	7467221	2124-469	500 ml x 15
Frebini® Energy Fibre 500 ml	7468221	2124-477	500 ml x 15
Spuiten			
Freka® Connect 1 ml, ENFit/ProNeo LDT	9000788LDT	3644-945	30
Freka® Connect 2,5 ml, ENFit/ProNeo LDT	9000782LDT	3644-952	30
Freka® Connect 5 ml, ENFit/ProNeo LDT	9000783LDT	3644-978	30
Freka® Connect 10 ml, ENFit	9000784	3393-816	100
Freka® Connect 20 ml, ENFit	9000785	3393-824	100
Freka® Connect 60 ml, ENFit	9000786	3393-832	50
Freka® Connect 60 ml, ENFit	9000786XS	3762-671	10
Freka® Connect 100 ml, ENFit	9000787	3396-991	30



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 9
2627 Schelle
+32 (0)3 880 73 00
info.be@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.be
www.fresubin.be

2019-05-14/37