

Freka[®] Pexact

Informatie over de verzorging van
de Freka[®] Pexact



Datum van de plaatsing van de Freka[®] Pexact:

Datum van de vervanging (3 maanden na plaatsing):

Datum van de verwijdering van de hechtingen (10 dagen na plaatsing):

Hieronder vindt u patiëntenlabels met de logistieke informatie van de sonde.
Dit garandeert de traceerbaarheid van de sonde.

Inhoudstafel

1. Plaatsing van de sonde	p. 4
2. Toediening van sondevoeding	p. 5
3. Verzorging van de sonde	p. 5
4. Verstopping van de sonde	p. 6
5. Verzorging van de punctieplaats	p. 6
6. Controle van het vulvolume van de ballon	p. 7
7. Medische voeding bij Fresenius Kabi	p. 7

1. Plaatsing van de sonde

Waaruit bestaat de ingreep?

De voedingssonde wordt in de maag gebracht en blijft in de maag vastzitten door middel van een ballonnetje dat wordt gevuld met water.

Vorbereiding

Op de dag van de plaatsing van de sonde, zal de huid van uw buik worden geschoren en gewassen.

Na de ingreep

Volgens het medisch advies wordt er aanbevolen om nuchter te blijven tot minstens 1 à 2 uur na de plaatsing van de sonde. De sondevoeding zal worden gestart of voortgezet volgens de aanbevelingen van uw arts en/of diëtist(e).

In het begin is pijn in het stomagebied normaal.

Hoe lang zal ik de sonde moeten behouden?

Het wordt aanbevolen de Freka® Pexact sonde na 90 dagen te vervangen. De sonde kan worden vervangen door een ballonsonde, bijvoorbeeld een Freka® Gastrotube of een Freka® Belly Button.



Freka® Gastrotube



Freka® Belly Button


2. Toediening van sondevoeding

De enterale sondevoeding kan toegediend worden via:


- bolus of
- graviteit of
- een voedingspomp.

De hoeveelheid en het type Fresubin zal door uw arts en/of diëtist(e) worden bepaald op basis van uw behoeften.

Voor de praktische details, zie de gids „sondevoeding in de thuissitatie“.

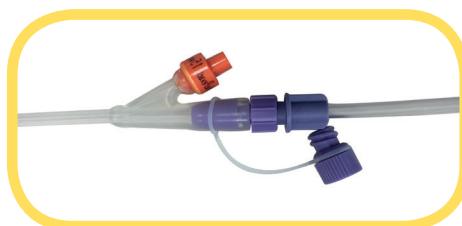

Connectie van de sonde met een voedingstrousse

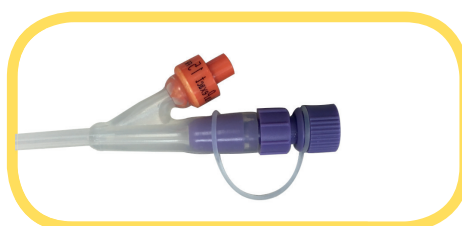

Afgesloten sonde


3. Verzorging van de sonde

Om te voorkomen dat de sonde verstopt raakt, moet deze vóór en na de voeding of medicatietoediening worden doorgespoeld met 20ml water.

Als u medicatie via de sonde moet toedienen, dient u deze bij voorkeur in vloeibare vorm toe te dienen. De medicatie mag niet gelijktijdig met de sondevoeding worden toegediend. Indien de medicatie niet in vloeibare vorm beschikbaar is, vraag dan advies aan uw apotheker.


Opgelet

Het spoelen en toevoegen van medicatie gebeurt enkel via het maaguiteinde van de sonde (niet via het oranje ventiel). Dit wil zeggen via de paarse connector van de sonde met behulp van een paarse ENFit spuit.

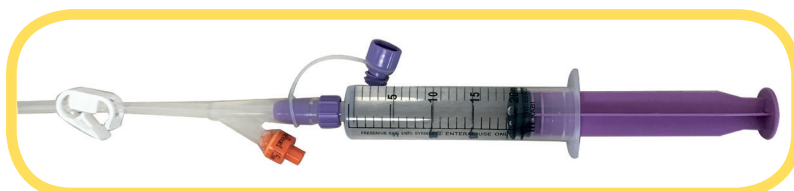

4. Verstopping van de sonde

Als de Freka® Pexact sonde toch verstopt raakt, dan kunt u de onderstaande stappen doorlopen totdat de sonde ontstopt is:

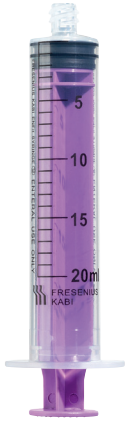

1. Doorspuiten van lucht met een ENFit spuit (10ml).
Indien geen succes, ga naar stap 2.
2. Doorspoelen met lauw water. Hierbij moet u geen kracht uitoefenen.
Indien geen succes, ga naar stap 3.

Onder medisch toezicht:

3. Inbrengen van 30ml bicarbonaatoplossing 5%. Een aantal minuten weken en proberen door te spuiten met lucht. Eventueel een aantal keer herhalen.
Indien geen succes, ga naar stap 4.
4. Inbrengen van acetylcysteïne oplossing (= 1 bruistablet acetylcysteïne 600mg oplossen in water).

De producten van stap 3 en 4 zijn verkrijgbaar bij de apotheek. Als geen van de stappen hierboven een oplossing biedt, dan kunt u best uw behandelende arts raadplegen.

Bij een verstopping mag het lumen van de sonde in geen geval met kracht worden vrijgemaakt.

5. Verzorging van de punctieplaats



Gedurende de eerste week wordt het aanbevolen om de punctieplaats dagelijks te controleren en het verband dagelijks te vervangen. Daarna dient de frequentie van het vervangen van het verband afgestemd te worden op de toestand van de wonde (ongeveer elke 2 tot 3 dagen).

Zet de blauwe klem van het externe fixatieplaatje open en trek het naar achteren zodat de punctieplaats en de onderkant van het externe fixatieplaatje kan gereinigd worden.

Nadat de stoma is genezen, kunnen de punctieplaats en de onderkant van het uitwendige fixatieplaatje dagelijks met warm water en milde zeep worden gereinigd.

Droog de punctieplaats goed af! Zo nodig kan een splitgaasje op de droge punctieplaats worden aangebracht, onder het fixatieplaatje

Dompel de sonde bij het verzorgen 3cm heen en weer.

6. Controle van het vulvolume van de ballon

Het vulvolume van de ballon moet 1 keer per week gecontroleerd worden door een arts of verpleegkundige.

Schuif de sonde in het stomakanaal.

Het is absoluut belangrijk om de sonde op haar plaats te houden om te voorkomen dat de sonde uit het stomakanaal zou komen.

Breng een 5 ml spuitje aan het oranje ventiel.

Zuig de vulvloeistof op en gooi dit weg.

Vul de ballon opnieuw met 5 ml steriel water.

Belangrijk

Als de ballonsonde per ongeluk werd verwijderd, moet onmiddellijk een arts geconsulteerd worden omdat het stomakanaal zich snel weer kan sluiten.

7. Medische voeding bij Fresenius Kabi

Fresenius Kabi biedt een volledig gamma aan drinkvoedingen, sondevoedingen en toebehoren.

Deze zijn beschikbaar bij uw apotheek of uw thuiszorgfirma.


Het doel van medische voeding is om voedingstekorten aan te pakken wanneer men niet meer in staat is om de behoeften te dekken via de gewone voeding.

De juiste voedingsondersteuning op het juiste moment kan helpen in het verminderen van medische complicaties en het herstel en om de onafhankelijkheid te verbeteren.

Indien u vragen heeft, kan u steeds met ons contact opnemen via telefoon op het nummer 03 880 73 00, via het contactformulier op onze website www.fresenius-kabi.be of via het mailadres info.BE@fresenius-kabi.com.



Orale voedingen

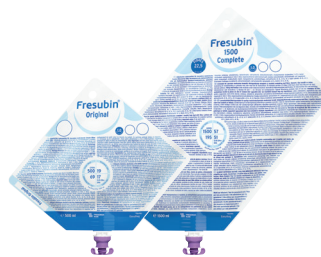

Sondevoeding



Spuiten en toebehoren



Pompen



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi België/Belgique NV/SA
Brandekensweg 9
2627 Schelle
Tel.: +32 (0)3 880 73 00
info.be@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.be
www.fresubin.be