

EasyBag: Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding



Was en desinfecteer uw handen.



Controleer de vervaldatum op de zwarte balk van de EasyBag.



Controleer de integriteit van de verpakking en de inhoud. Niet gebruiken als de zak beschadigd of gezwollen is of als de inhoud is gestold.



Schud de EasyBag goed om te verzekeren dat de volledige inhoud is gemengd.

Aankoppelen van de trousse met de EasyBag

Staande EasyBag



Hangende EasyBag



De trousse en de EasyBag kunnen in elke positie geconnecteerd worden zonder lekkage ► dankzij de unieke anti-terugvloei klep in de poort.

Verwijder de vleugelvormige dop. Deze dop garandeert dat de EasyBag ongeopend is.

Voor toediening via **zwaartekracht**: sluit de rolregelklem.

Voor toediening via **pomp**: sluit de klem.


Verwijder de beschermkap van de spike.

Breng de spike van de trousse in de EasyBag.

Schroef de trousse vast op de EasyBag. Draai aan de schroef en niet aan de druppelkamer.

Vul de druppelkamer voor de helft met de sondevoeding door deze enkele keren samen te knijpen.

Toediening via zwaartekracht of via een pomp

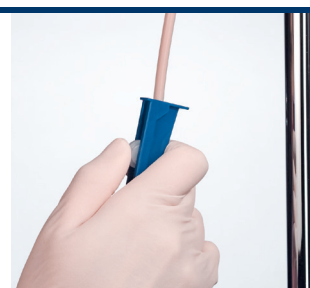

De EasyBag kan geconnecteerd worden ► met een graviteitstrousse, of ► met een trousse voor toediening via pomp zoals nodig is volgens het voorgeschreven voedingsprotocol.

Voor toediening via **zwaartekracht**: vul de trousse met de sondevoeding om ervoor te zorgen dat er geen lucht wordt toegediend. Stel de rolregelklem in volgens het voorgeschreven voedingsprotocol.

Voor toediening via **zwaartekracht**: controleer regelmatig het debiet en pas de rolregelklem aan indien nodig.


Voor toediening via **pomp**: plaats de trousse in de pomp en vul deze met de sondevoeding om ervoor te zorgen dat er geen lucht wordt toegediend. Stel het debiet in volgens het voorgeschreven voedingsprotocol.

Loskoppelen van de trousse met de EasyBag

Staande EasyBag



Hangende EasyBag

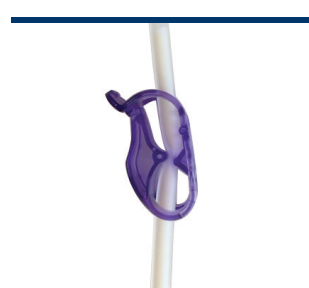

De trousse en de EasyBag kunnen in elke positie losgekoppeld worden zonder lekkage ► dankzij de unieke anti-terugvloei klep in de poort.

Stop het doorlopen van de sondevoeding in de trousse door de rolregelklem of de klem te sluiten.

Draai de schroef van de trousse los. Draai aan de schroef en niet aan de druppelkamer.

Haal de spike uit de EasyBag.

Er is geen lekkage van de sondevoeding - de losgekoppelde EasyBag is gesloten, de inhoud is beschermd tegen zuurstof en contaminatie ► dankzij de unieke anti-terugvloei klep in de poort.

Sondevoeding via bolus



Verwijder de vleugelvormige dop. Deze dop garandeert dat de EasyBag ongeopend is.



Verwijder de beschermkap van de spike.



Breng de spike in de EasyBag en schroef deze vast.



Verbind de spuit met de bolus adapter en trek de sondevoeding op in de spuit.



De bolus adapter en de EasyBag kunnen geconnecteerd blijven tot max. 24u.



Ook beschikbaar als online training:
www.easybag-training.com